


DEUTSCH

Erinnerungskarte




Lesen Sie vor Gebrauch die in der Packung mitgelieferte Gebrauchsanweisung durch. Beachten Sie bei der Verwendung der Spritze die folgenden wichtigen Schritte:

Drücken des Kolbens

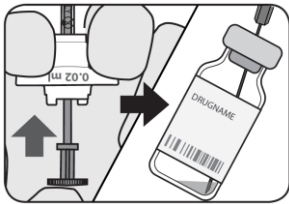

Drücken Sie den Kolben nach innen bis er stoppt und stechen Sie anschließend die Kanüle in die Durchstechflasche. Die Durchstechflasche schräg halten, um sicherzustellen, dass die gesamte Flüssigkeit entnommen werden kann.

Verlagerung der Luft

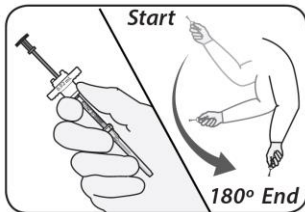


Start = Start

180° End = 180° Ende

Das kanülenseitige Ende zeigt zur Handfläche. Schwingen Sie den Arm mehrmals **sehr schnell** und **sehr kräftig** nach unten, um die Flüssigkeit vom kanülenseitigen zum kolbenseitigen Ende zu verlagern.

Position der Luft überprüfen

Visisure Patientenerinnerungskarte – Text

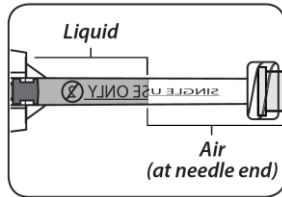


Liquid = Flüssigkeit

Air (at needle end) = Luft (am Kanülenende)


Blicken Sie durch den Spritzenzylinder: Der **durch die Flüssigkeit** betrachtete Text erscheint vergrößert. In der Flüssigkeit dürfen keine Luftblasen sichtbar sein.

Dosis einstellen

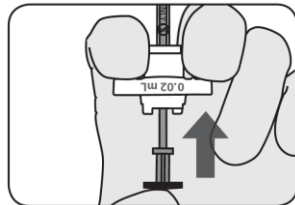

Um die Luft zu entfernen und die korrekte Dosis einzustellen, drücken Sie den Kolben **langsam** bis er stoppt.

Entsperren und Injektion

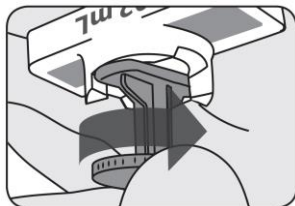

Drehen Sie den Kolben, bis die Kolbenflügel auf einer Linie mit den grauen Markierungen ausgerichtet sind und bringen Sie im Anschluss die Nadel in die Injektionsstelle ein.

Niedrigvolumige Präzisionspritze 0,02 ml

Visisure